

**WALMARK®****15 min. SZYBKIE DZIAŁANIE**

Lotka Informacyjna

**express****Wspomaga leczenie zapalenia zatok przynosowych i nieżyty nosa (kataru).  
15 ml, aerozol do nosa.**

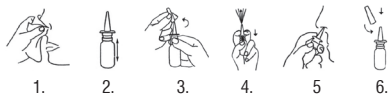
**MECHANIZM DZIAŁANIA:** Aerozol do nosa Sinulan Express Forte jest preparatem obkurczającym naczynia błony śluzowej nosa; występuje w postaci hipertonicznego lepkiego roztworu stosowanego w leczeniu objawów zapalenia zatok przynosowych i nieżyty nosa różnego pochodzenia. Aerozol do nosa Sinulan Express Forte tworzy powłokę na powierzchni błony śluzowej nosa. Dzięki działaniu osmotycznemu powłoka ta zaczyna natychmiast przyciągać wodę z hipotonicznego płynu znajdującego się w głębszych partiach błony śluzowej, ułatwiając jej przepływ z wewnątrz na zewnątrz. Ten mechaniczny efekt wypłukuje zanieczyszczenia obecne w jamie nosowej, przyczyniając się do odblokowania przewodów nosowych. Usunięcie warstwy śluzu blokującego zatoki jednocześnie otwiera je, zmniejszając ciśnienie i ból. Powłoka utworzona przez wyrób Sinulan Express Forte chroni również powierzchnię nosa przed wysuszeniem, podrażnieniami oraz czynnikami zewnętrznymi. Składniki preparatu ułatwiają oddychanie w bardzo krótkim czasie.

**SKŁAD:** glicerol, woda, hydroksypropyloceluloza, olejki eteryczne z *Mentha piperita*, *Eucalyptus globulus*, *Thymus satureioides* i *Rosmarinus officinalis*.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

Wyłącznie do stosowania miejscowego.

1. Przed zastosowaniem wyrobu dokładnie oczyścić nos.
2. Wstrząsnąć butelką.
3. Zdjąć nasadkę ochronną.
4. Nacisnąć pompkę aplikatora (raz lub dwa) do momentu, aż pojawi się mgiełka preparatu.
5. Delikatnie włożyć aplikator do jednego otworu nosowego, zaaplikować 2-3 razy do każdego otworu nosowego podczas wdechu. Powtarzać czynność 2-3 razy dziennie, a w razie potrzeby częściej, aż do całkowitego wyzdrowienia.
6. Nałożyć nasadkę ochronną po każdorazowym użyciu.

**ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:**

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią ulotki. Wyrób wyłącznie do stosowania miejscowego w jamie nosowej.

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z listą składników. Nie należy stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu. Każdorazowo przez pierwszych 10-15 minut po zastosowaniu może być odczuwalne delikatne mrowienie spowodowane mechanizmem działania wyrobu Sinulan Express Forte. Jeśli podrażnienie jest zbyt intensywne lub utrzymuje się zbyt długo, zaleca się zaprzestanie stosowania wyrobu ze względu na możliwość reakcji alergicznej na jeden ze składników wyrobu Sinulan Express Forte.

Preparat wykazuje działanie około 10-15 minut po aplikacji, powodując znaczny wzrost wydobywania się wydzieliny z nosa. Przez ten czas nie należy wykonywać powtórnej aplikacji. Nasilenie wydobywania się wydzieliny z nosa może trwać nawet 4-6 godzin, w zależności od początkowego stopnia zablokowania dróg nosowych (przekrwienia błony śluzowej nosa).


Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu 7 dni stosowania aerozolu do nosa Sinulan Express Forte objawy utrzymują się i nie obserwuje się poprawy. Ze względu na początkowe uczucie mrowienia nie zaleca się stosowania aerozolu do nosa Sinulan Express Forte u dzieci poniżej 12. roku życia.

Preparat przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Po każdorazowym użyciu nałożyć nasadkę ochronną. Nie stosować wyrobu po upływie terminu ważności, po upływie 30 dni od pierwszego otwarcia ani gdy opakowanie jest uszkodzone.

Preparat może być stosowany przez dzieci powyżej 12. roku życia, kobiety w ciąży i karmiące piersią.

**DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE:**

Nie są znane żadne działania niepożądane stosowania wyrobu. Aerozol do nosa Sinulan Express Forte nie jest szkodliwy w przypadku poknięcia. Należy przerwać stosowanie aerozolu Sinulan Express Forte, jeśli w ciągu kilku minut po aplikacji preparatu wystąpi działanie niepożądane lub reakcja alergiczna.

**WYTWÓRCA:** **VITROBIO SAS**, ZAC de Lavaur, 63500 Issoire, France**Dystrybutor:** Walmark Sp. z o.o. ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, www.walmark.pl, info@walmark.pl

Data ostatniej aktualizacji: październik 2018r.

VACN0306

W 00802/L/04/POL



W A L M A R K ® Dispatch note of print out packing material W A L M A R K ®

Design/Year:

Chamot / 2015 DTP operator / Studio:

David Kněžek(A,B) / Internal Proof numb./Date 1. proof:

6 / 25.10.2018

Used printing material:

80 60 g Special printing technology:

- Used Colours: 4

Cut Size (mm):

150 x 210 mm

C Y A N

M A G E N T A

Y E L L O W

B L A C K