

Sinulan Rinse

Wyrób medyczny



Sinulan Rinse to wyrób medyczny przeznaczony do płukania nosa i zatok. Wyrób zawiera rozpuszczalny chlorek sodu do sporządzenia izotonicznego lub hipertonicznego roztworu przeznaczonego do płukania nosa i zatok.

Sinulan Rinse udrażnia i oczyszcza nos oraz zatoki z nadmiernej wydzieliny oraz zalegającego śluzu, przez co ogranicza gromadzenie się czynników mających wpływ na powstawanie infekcji.

Wskazania:

W prewencji i objawowym leczeniu nosa i zatok, głównie w przypadku:

- zapalenia błony śluzowej nosa i zatok,
- katarze o różnym podłożu,
- w higienie nosa i zatok

Dawkowanie:

Dla dzieci powyżej 4. roku życia oraz dorosłych. Płukanie przeprowadzić 1-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza. W celach profilaktycznych stosować 2-3 razy w tygodniu. Godzinę po płukaniu nie należy wychodzić na zewnątrz (przy temperaturze poniżej 19°C). Płukanie należy przeprowadzić najpóźniej godzinę przed snem. Każdorazowo przed przystąpieniem do płukania sprawdzić temperaturę wody.

	EAN	Zawartość
Sinulan Rinse Zestaw irygator + 12 saszetek	8 596024 021982	Irygator + 12 saszetek
Sinulan Rinse Zestaw uzupełniający 30 saszetek	8 596024 021999	30 saszetek

Składniki:

Chlorek sodu

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość (alergia) na składniki wyrobu. Nie stosować w przypadku otwartych, niegojących się ran w nosie, w szczególności po operacjach. Zestawu nie powinny używać osoby z całkowicie zablokowaną przegrodą nosową lub z infekcją ucha. Nie stosować w przypadku problemów z równowagą lub w sytuacji występowania poważnego krwawienia z nosa. Po operacjach laryngologicznych, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

W przypadku chorób objawiających się zwężeniem dróg oddechowych (np. astma, zapalenie oskrzeli itp.) przed zastosowaniem wyrobu należy skonsultować z lekarzem.

W razie jakichkolwiek pytań lub gdy objawy utrzymują się przez dłuższy czas, należy skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować wyrobu po upływie terminu ważności umieszczonego na saszetce oraz na opakowaniu zewnętrznym oraz gdy opakowanie lub którakolwiek część zestawu jest uszkodzona. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze 15-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Wytwórca:

Gofarm Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Górników 21/26

30-819 Kraków, Polska

www.gofarm.pl

Wyprodukowano dla: Stada Pharm sp. z o.o.

THE PARK WARSAW

ul. Krakowiaków 44

02-255 Warszawa